

ORAc collect·DNA

唾液样本采集管
(DNA自采集工作包, ORAc collect)
规格型号: ORAc collect·DNA OCR-100
用于体外诊断



采集注意事项:

确保海绵顶部在采集之前并未接触到任何表面。

供者在采集口腔样品前 30 分钟内不得进食、
饮水、吸烟或嚼口香糖。

预期用途: 用于采集和稳定人类口液样本中的DNA

内含物: 包含 1 个采集工具包

产品描述: 由收集海绵、帽、螺纹盖、收集管及固定液组成

警告和预防措施: 哽塞风险。在将海绵插入供者的口腔时, 应小心谨慎。

如果液体接触到眼睛或皮肤, 请用水冲洗。切勿吞食。请登陆 www.dnagenotek.com 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15℃/25℃

工具包的概述和说明:

ORAc collect, 试剂盒中含有采集人口液样本需要的材料和说明。

保质期: 24个月

收集到DNA的存储期: 60天

生产日期: 见产品本身

标签文字说明:

REF	目录号
MD	体外诊断医疗设备
CE	CE 标志
制造商	制造商
EC REP	获授权代表
15°C/25°C	存储说明
👤	样本采集方式 (有效期)
LOT	批号

中文 样本采集说明:

	打开包装并在不接触海绵顶部的前提下取出采集器。尽可能舒适地将海绵置于口腔后部, 并沿着下牙床来回摩擦 (见特写图片)。轻柔地摩擦牙床 10 次。如果可能, 避免摩擦牙齿。
	在口腔的另一侧轻柔地重复此摩擦动作, 沿着下牙床再摩擦 10 次。
	保持玻璃管处于直立状态, 以防止管内的液体溢出。在不接触海绵的前提下, 旋开采集管上的蓝色盖子。
	倒转盖子, 将海绵插入玻璃管并旋紧盖子。
	倒置封盖的玻璃管, 并猛烈地摇晃 15 次。

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务单位:
名称: 捷通埃默高(北京)医药科技有限公司
地址: 北京市海淀区苏州街18号院-2楼12A08室
电话: 010-82608228
传真: 010-82609915

备案凭证编号: 国械备20170939号
产品技术要求编号: 国械备20170939号

OCR-100 ORAc collect®·DNA 在美国没有上市。
®ORAc collect 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。
有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。
所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 (www.dnagenotek.com) 的“支持”部分获得。

专利 (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2017 DNA Genotek Inc.—OraSure Technologies, Inc. 子公司, 保留所有权利。
PD-PR-00255 (ZH - Chinese) Issue 4/2017-09 说明书修订日期: (以备案凭证下发日期为准 2017.09.07)



用于体外诊断

DNAgenotek



生产企业/备案人: DNA Genotek Inc.
生产企业地址/备案人住所:
3000 - 500 Palladium Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757
传真: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com